

NAVODILO ZA UPORABO

ADQUIPMENT Medical ADFusor II Perfusor



Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

1. Off - izklop držati 5 sek. Tipka se med infuzijo ne aktivira.
2. On - vklop
3. RUMENA LUCKA - lučka bo prižgana, kadar se dela pod baterijskim napajanjem (4-10 ur)
4. ZELENA LECKA - priključeno na omrežje (220V, 50Hz)
5. indikator velikosti brizgalke (reagira avtomatsko glede na pozicijo zaklepa)
6. STOP stikalo - prekinitev infuzije (stikalo držati 1-2 sek.)
7. START stikalo –začetek infuzije oz. nadaljevanje
8. ALARM
9. Tipke za nastavitve območja
11. zaslon
12. izklop zvočnega alarma
13. Tipka za pospešitev infuzije z maksimalno hitrostjo

Service mode: "1" DODATEK med infuzijo
"0" POTREBNO JE APARAT USTAVITI (STOP → PURGE)
do 2 ml (MAX.PURGE)

14. prikaz volumna (koliko ml je bilo infuzirano)
15. zaklep
16. Pomikajoči se bat
17. napetostni priključek
18. RS 232 priključek (računalnik)
19. podporna nogica
20. držalo

Maximalna hitrost doziranja:

299,9 ml/hr	50ml brizgalka
149,9 ml/hr	20ml brizgalka
99,9 ml/hr	10ml brizgalka

Nastavitve za »service mode«:

- Izbira brizgalke
- Izbira jezika
- Nastavitev alarma
- Nastavitev območja za doziranje
- Purging (odvajati)
-

Mikro+Polo Servis

Rešujemo težave.



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**