

NAVODILA ZA UPORABO

AGA ležišča za transfuzijo (ležišče za dialize in odvzem krvi)

AG-BSL-1065/G



Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

Razstavljanje in sestavljanje

Navodila za postavitve ležišča

Material – lepenka

Dimenzije

– cca. 2000 x 700 x 750 mm (DxŠxV)

1. Postavite ležišče v originalnem pakiranju v bližini, kjer ga želite postaviti.
2. Paketa ne odpirajte s silo.
3. Transfuzijsko ležišče je dostavljeno v kompletu. Vsa dodatna oprema se nahaja v paketu.

Opomba

Proizvajalec ne krije stroškov poškodb, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo.

Namestitev

1. Ležišče postavite na noge.
2. Za uravnavanje stabilnosti, kadar tla niso ravna, uporabite navoje za nastavitve višine, ki se nahajajo na spodnjem delu (ta točka ni primerna, če naročite mizo s stojali).
3. Dodatna oprema (naslonjala za roke in pritrditvene objemke) je privita na dnu vertikalnega prečnika (spodnji del sedala/naslona)

Samo za ležišča za dializo:

4. Transfuzijski dodatni nastavek mora biti potisnjeni navznoter (230 VACA, 50/60Hz).

Takoj po nastavitvi lahko ležišče uporabljate.

Navodila za postavitve ležišča DLS-1065/E za dializo v „šok pozicijo“ s pomočjo ročnega stikala

Pri rokovanju z ročnim stikalom zlahka prilagodimo ležišče in s tem pacienta v šok pozicijo. Nasloni za roke so pritrjeni na sedalo in se premikajo s sedalom, tako se pacienti ni potrebno premikati in nameščati v pravi položaj.

Nastavljiv podnožnik

Na ležiščih, namenjenih dializam, so nameščeni prilagodljivi podnožniki. Pacienti v primeru krča v mečih pritisnejo s stopali na nastavljiv podnožnik, ki ga je mogoče nastaviti glede na dolžino pacientovega telesa.

Odvijte obe črni objemki in nastavite naslon za stopala in objemke ponovno privijte.

Nastavitev ležišča za odvzem krvi BSL-1065/G v šok pozicijo s pomočjo nožnega stikala

Z aktiviranjem pnevmatskega cilindra s pomočjo nožnega pedala lahko postopno uravnamo ležišče in tako pacienta namestimo v „šok pozicijo“. Rok, ki počivajo na naslonu za roke pacientu ni potrebno premikati, saj se naslon nastavlja sorazmerno s sedalom.

Naslonjalo in naklon nog na ležišču za dializo in odvzem krvi

Naslonjalo in naklon nog uravnavamo s pomočjo pnevmatskega cilindra (ročna nastavitev). Aktivirajte vzvod v smeri proti glavi.

Čiščenje in vzdrževanje

Potrebno je redno čiščenje. Vsi sistemi za nastavljanje morajo biti zaščiteni pred tekočinami. Pobarvani deli se čistijo z neagresivnimi čistili. Naknadno jih je treba obrisati s suho krpo. Ne sušite ležišča kar tako na zraku ali soncu.

Pogonskih mehanizmov ni potrebno vzdrževati.

Tehnični podatki

Nastavitev naslona: 800 x 650 mm

Nastavitev sedala: 480 x 650 mm

Nastavitev naklona nog: 540 x 650 mm

Višina: 650 mm

Debelina blazine: 90 mm

Motor: 230 VAC, 50/60 Hz., 2,4 A, 510 W, IP55, v=14 mm/s (samo pri ležišču, namenjenem za dializo)

Varnostni napotki

Tako dodatno opremo kot nadomestne dele lahko uporabljate le originalno opremo in rezervne dele podjetja AG Sanitaetsartikel GmbH ali opremo in rezervne dele, ki vam jih dostavijo pooblaščen dobavitelji.

Kot uporabniki prevzimate vso odgovornost, v kolikor ne upoštevate prejšnjega odstavka.

Pomični podajalec

Podajalec je na voljo le kot dodatna oprema.

Nastavljiva ležišča so v kompletu opremljena z nastavljivim stojalom. Set stojal (štiri kom.) vključuje dve stojali, ki jih je mogoče zakleniti in so nameščena dijagonalno. Stojala s centralnim zaklepanjem so opremljena z navorom na stebriču v bližini glave.

Z izravnavanjem višine stojala se lahko avtomatično zaklenejo ali sprostijo.

CE deklaracija primernosti

v skladu z CE smernicami 93/42/EWG

S tem potrjujemo, da ležišča za odvzem krvi in dializo uvrščamo v I. razred glede na model in konstrukcijo. V tej obliki je postavljen na trg v skladu predpisanimi merili »Guideline 93/42 Council EC na nivoju medicinskih produktov z dne 14. 6. 1993« in opremljen s simbolom CE, ki izkazuje kvaliteto.

Vsako nedovoljeno spreminjanje razveljavlja deklaracijo.



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISIA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**