

## NAVODILA ZA UPORABO

# AGA pregledovalna miza Podajalec papirja FQ.7.5.204.01 AG-PU-6000



**AGA**  
Sanitätsartikel GmbH

Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.  
Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!  
Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

## Navodila za postavitve ležišča

Material - lepenka  
Dimenzije - cca. 2000 x 700 x 150 mm (D x Š x V) – ležišče 65 cm  
- cca. 2000 x 870 x 150 mm (D x Š x V) – ležišče 80 cm

1. Postavite ležišče v originalnem pakiranju v bližini, kjer ga želite postaviti.
2. Paketa ne odpirajte s silo.

## Opomba

Proizvajalec ne krije stroškov poškodb, ki nastanejo zaradi neupoštevanje teh navodil za uporabo.

## Uporaba

1. Ležišče obrnite na glavo z oblazinjenim delom navzdol.  
Za ležišča z jeklenimi nogami:
2. Noge močno privijte v vse štiri vogale ležišča s priloženim orodjem. Prepričajte se, da so varovalne ploščice na notranji strani prav tako dobro privite. Dve nogi morata biti opremljeni z eno, drugi dve pa z dvema varnostnima ploščicama. Nogi z dvema varovalnima ploščicama morata biti pritrjeni tam, kjer je naslon za glavo.
3. Ležišče postavimo na noge.  
Za ležišča s ploščatimi ovalnimi nogami:
2. Noge močno privijte v vse štiri vogale ležišča s priloženim orodjem. Prepričajte se, da so varovalne ploščice na notranji strani dobro privite. V primeru, da so tla neravna, lahko s pomočjo le-teh neenakosti prilagodimo s priloženim orodjem.
3. Ležišče postavimo na noge.

## Navodila

Vzglavje je opremljeno z varnostno zavoro, ki onemogoča, da naslonjalo za glavo zdrsne iz tirnic mehanizma za dviganje in spuščanje.

## Čiščenje in vzdrževanje

Potrebno je redno čiščenje. Vsi r sistemi za nastavljanje morajo biti zaščiteni pred vdorom tekočin. Pobarvani deli se čistijo z neagresivnimi čistili. Naknadno jih je treba obrisati s suho krpo. Ne pustite, da se miza kar tako suši na zraku ali soncu.

## Tehnični podatki

Dolžina naslona: 500 mm  
Dolžina ležišča: 1400 mm  
Oblazinjen del: 50 mm  
Širina: 650 ali 800 mm  
Višina: 650 mm  
Dvig naslona za glavo: + 30°

## Varnostni napotki

Za nadomestne dele lahko uporabljate le originalno dodatno opremo podjetja AGA Sanitaetsartikel GmbH ali dodatno opremo pooblaščenih dobaviteljev.

Uporabniki prevzemajo vso odgovornost ob uporabi nedovoljene dodatne opreme.

## Navodila za namestitve podajalca papirja

Nastavek za podajalec papirja je na voljo kot dodatna oprema in ni del standardne opreme, ki vključuje:

- nastavek in palica
- dva L-profila
- štiri vijake

- 1) Nastavek podajalca papirja privijete na spodnji strani mize kjer je naslon za glavo.
- 2) Dve luknjici na L-profilu (na krajšem delu) nastavite natančno na luknjice na spodnji strani naslona za glavo.  
**Pozor: na koncu vsakega L-profila sta okrogla črna čepka. Usmerjena morata biti eden proti drugemu.**
- 3) Palico vstavite med L-profile na vrhu pri črnih čepkih tako, da rahlo potisnete L-profile narazen.

## CE deklaracija primernosti

v skladu z CE smernicami 93/42/EWG

Ležišče uvrščamo v I. razred glede na model in konstrukcijo. Takšno je predano v prodajo v skladu predpisanimi merili »Guideline 93/42 Council EC na nivoju medicinskih produktov z dne 14. 6. 1993« in opremljeno s simbolom CE, ki izkazuje kvaliteto.

Vsako nedovoljeno spreminjanje razveljavlja deklaracijo.



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

#### DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme  
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

#### Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**