


## NAVODILO ZA UPORABO APARATA

# LMB AGITATOR 96

## stresalnik za trombocite

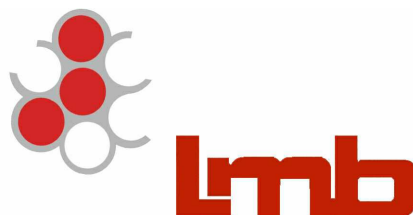

Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

## KAZALO

1.	Opis	3
2.	Tehnični podatki	3
3.	Odstranitev embalaže in pregled	3
4.	Zagon stresalnika	3
5.	Vzdrževanje	3
6.	Čiščenje	4
7.	Opozorilo	4
8.	Garancija	4
	Servis Mikro+Polo	5

**OPOMBA: Pričujoča navodila so le izvleček originalnih navodil. Pred uporabo je zato obvezno prebrati originalna navodila. Za natančnejše informacije in napotke poglejte originalna navodila**



## **1. OPIS**

Stresalnik za trombocite je predviden za stresanje krvnih ploščic med hrambo v klimatski komori. Posebni nosilci lahko nosijo do 96 krvnih vrečk. Visoko kvalitetni motor stresa vrečke s hitrostjo 50 krat na minuto. Izvedba nosilcev zagotavlja horizontalno pomikanje trombocitov.

## **2. TEHNIČNI PODATKI**

Agitator za 96 krvnih vrečk  
model AG-10002

**Kapaciteta:** 96 krvnih vrečk  
**Dimenzije:** 35,6 x 88,9 x 38,1 cm  
**Teža:** 38,5 kg  
**Napajanje:** 200 V / 50 Hz / 50 W  
**Klasifikacija:** Tip C

## **3. ODSTRANITEV EMBALAŽE IN PREGLED**

Vsak stresalnik je ob dobavi popolnoma sestavljen in tako pripravljen za uporabo. Takoj po dobavi je potrebno aparat preveriti in takoj sporočiti vse morebitne poškodbe in okvare v roku 24 ur.

## **4. ZAGON STRESALNIKA**

- Aparat mora biti izklopljen (stikalo za vklop mora biti v poziciji 0). Vtikač vtaknemo v vtičnico 220-240 V / 50 Hz.
- Pritisnemo stikalo za vklop (v pozicijo I).
- Krvne vrečke nameščamo na poličke tako, da posamezno izvlečemo, položimo vrečke nanjo in jo nato ponovno potisnemo v stresalnik. Varnostna zaponka preprečuje, da bi poličko popolnoma izvlekli.
- Na vsako poličko lahko namestimo do 8 krvnih vrečk.
- Ves čas hranjenja krvnih vrečk je stresalnik priklopljen in stresanje je aktivirano.

## **5. VZDRŽEVANJE**

OPOMBA: Stresalnik lahko vzdržuje le kvalificiran serviser. Za podatke o kontaktu preberite stran 5 teh navodil.

Da zagotovimo dobro delovanje stresalnika, je priporočljivo periodično opraviti redni pregled 1 x letno.



## **6. ČIŠČENJE**

Stresalnik lahko čistimo z vlažno krpo in z blagim detergentom.

## **7. OPOZORILO**

Stresalnika ne smemo uporabljati v bližini vnetljivih detergentov in drugih vnetljivih snovi. Proizvajalec je odgovoren le za pomanjkljivosti v varnosti, zanesljivosti in delovanju stresalnika, če je bil le-ta postavljen in vzdrževan kot je opisano v poglavju 5. »Vzdrževanje«.

## **8. GARANCIJA**

Proizvajalec daje garancijo na stresalnik za obdobje 1 leta od dobave. Garancija vključuje defektne dele in okvare, ki so se zgodile v času izdelave aparata. Proizvajalec ne prizna garancije, če stresalnik ni uporabljan v skladu z navodili.

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav aparata, oziroma njegovih delov. Proizvajalec se ne obvezuje, da bo iste izboljšave izvedel tudi na že prodanih aparatih.



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

#### DEJAVNOSTI SERVISIA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme  
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

#### Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**