

# NAVODILO ZA UPORABO TESTA

## PROPPER

### Seracult fecal occult blood test

PP-371001



**propper**

Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.  
Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!  
Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

Test za detekcijo skrite krvi v človeških iztrebkih za in -vitro-diagnostično uporabo.

Seracult gvajak test je kvalitativna pomoč v diagnosticiranju kolorektalnega raka. Narejen je za uporabo v rutinskih preiskavah v zasebnih praksah, bolnišnicah in laboratorijih.

Osnovni principi Seracult gvajak testa

- odvzet vzorec se aplicira na eno stran gvajak- impregniranega papirja, ki je na voljo
- dve kapljici razvijalca se aplicirata na zadnjo stran papirja
- v kolikor odvzet vzorec vsebuje okultno kri, hemoglobin iz krvi reagira na impregniran gvajak in razvijalec producira modro barvo. To se zgodi med 30-60 sekundami po aplikaciji razvijalca.

## Servis Mikro + polo



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

### DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme  
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

### Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**