

## NAVODILO ZA UPORABO APARATA

# SÖHNGEN VTI ročna zračna črpalka

S1-0603050



# SÖHNGEN<sup>®</sup>

Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

VTI ročna zračna črpalka z dvojno funkcijo je v uporabi za izčrpavanje zraka iz VTI vakuumske zračne blazine in VTI opornice. Uporablja se tudi za napihovanje drugih opornic. Preprosto uporabite ročno stikalo, s katerim preklopite iz funkcije polnjenja v funkcijo praznjenja.

Izdelana je iz trpežnih termo-plastičnih materialov. Sestavni deli so ročaj na vrhu, podstavek, povezovalna cev in stikalo za preklop med funkcijama (2 x 2000m<sup>3</sup> moči v skladu z DIN).

Za polnjenje zraka v zračne blazine ali opornice priklopite zračno cev na spodnji priključek in zaporedoma pritiskajte ročaj v smeri proti bazi črpalke. Za odstranjevanje zraka priklopite zračno cev na zgornji priključek, ki se nahaja na ročaju samem. Ročaj zaporedoma vlecite v smeri od baze črpalke, torej proti sebi.

#### Vzdrževanje

Odstranite vrh, izvlecite bat in ga previdno očistite. Pomembno je namreč, da so tesnilni obročki vedno dovolj podmazani.

**Mikro+Polo Servis**

**Rešujemo težave.**



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

#### **DEJAVNOSTI SERVISA:**

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme  
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

#### **Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!**

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**