

## NAVODILO ZA UPORABO APARATA

# SÖHNGEN

## pnevmatični 4-celična opornica

S1-604015



# SÖHNGEN<sup>®</sup>

Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

Močan, narejen iz dvoplastne plastične folije. Oranžne barve, odporen na vlago in temperaturno stabilen ter rentgensko prosojen. Patentna zadruga z grobimi zobci iz sintetičnega materiala, z on / off ventilom. 4 zračne celice delujejo simultano

Za varno in zanesljivo oporo zloma. Roka ali noga leži v stabilni zračni blazini, ki preprečuje draženje živcev ali prekinitev krvnega obtoka.

**Aplikacija:**

Odprta zadruga na opornici za nogo dodatno vsebuje zatezni jermenček. Previdno ga pritrdite na poškodovan ud in zaprite zadrugo in jermenček. Odprite varnostni ventil z zavojem v levo. Previdno vpihajte zrak z usti, dokler ni dosežena zadovoljiva imobilizacija. Zaprite ventil z zavojem v desno.

**Opozorilo:**

Zaradi nujnih omejitev tlaka morate vpihovati zrak le ustno in ne uporabljajte kakršnih koli dodatnih naprav ali podpore.

Pneuplast – ročna opornica: anatomsko oblikovana, upognjena za celo, ravna za polovico roke

Pneuplast – opornica za nogo: Opornica za celo ali polovico noge, z odprtino za prste in peto

Pneuplast – oblazinjena torba: Prenosna torba za set opornic

Pneuplast – odrasli:	za celo roko	06 04 005
	Za celo nogo	06 04 006
	Za pol roke	06 04 011
	Za pol noge	06 04 012
	Oblazinjena torba	06 04 007
3 delni set	opornica za roko, opornica za nogo, oblazinjena torba	06 04 004
5 delni set	opornica za roko, opornica za nogo, opornica za pol roke, opornica za pol noge, oblazinjena torba	06 04 010

**Mikro+Polo Servis**

**Rešujemo težave.**



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

#### **DEJAVNOSTI SERVISA:**

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme  
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

#### **Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!**

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**