

NAVODILO ZA UPORABO APARATA

SÖHNGEN FUTUR

varnostni sistem za transport pacienta

S1-0601091



SÖHNGEN[®]

Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

Za varno in popolno imobilizacijo celotnega telesa pacienta s politravmo na različnih transportnih sistemih od različnih izvedb nosil, vakuumskih blazin, itd.

FUTUR varnostni sistem sestoji iz dveh vertikalnih in štirih horizontalnih pasov, integrirani za doseg maksimalne varnosti poškodovanca. Vsi pasovi so prilagodljivi in nastavljivi glede na velikost telesa oškodovanca, vendar jih ni mogoče odpreti ali premikati posamezno.

Horizontalni pasovi so opremljeni z dodatnimi oblazinjenjem za zaščito in udobje pacienta na določenih ranljivih delih telesa. Na zgornjem delu telesa sta dodani dve zatezni ramenski blazinici in ena naprsna blazina za dodatno udobje in varnost. Nadalje se nahajajo dodatne blazinice na medeničnem pasu, na področju zgornjega predela nog in golenice.

Mikro+Polo Servis

Rešujemo težave.



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**