

NAVODILO ZA UPORABO APARATA

SURGIPATH NS3 Autopsijska žaga - čiščenje in razkuževanje -



 **Surgipath**

Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

Vsaka mrtvašnica ima sistem čiščenja in dezinfekcije prilagojen svojemu načinu dela. V izogib poškodbam opreme za čiščenje in dezinfekcijo in v pomoč osebju, Predlagamo sledeče:

1. NS3 žago je potrebno najprej očistiti in obrisati, šele nato razkužiti. Napravo lahko potopimo v razkužilo, vendar moramo upoštevati navodila proizvajalca.

! Nekatera sredstva za razkuževanje so močno korozivna, zato bodite pozorni, kako ta sredstva uporabljate. Z nepravilno uporabo lahko poškodujete kovinske dele in s tem ogrozite varno namakanje v dezinfekcijsko sredstvo.

2. Kadar uporabljamo močne tekočine za razkuževanje, žago potopimo vanje kar se da hitro, ter jo nato splahnemo.

! Priporočamo, da za dezinfekcijo uporabite novejša sredstva, ki niso tako korozivna.

3. Vakuum lahko povsem razstavite za namen čiščenja. Gumijasta cev, ročaj, koleno, sponke, snemljiv boben, vrečka iz blaga in oba filtra se lahko čistijo in razkužujejo posebej. Cev je na notranji strani zelo gladka. Splahnite jo, potem pa posesajte dezinfektant.

! Pomembno je, da naprava ne sme biti mokra, saj bo preostalo tekočino posrkalo v vakuumsko glavo, ko bomo napravo aktivirali.

! Eksaktor ne sme biti potisnjen navzdol. V odprtino bi lahko zašla tekočina in povzročila poškodbe glave. Obrisati jo je potrebno s krpo, pomočeno v dezinfektant.

4. Papirnato vrečo morate menjati najmanj enkrat dnevno.

! Ne priporočamo, da vrečke odvržemo šele ko je napolnjena, kot to naredimo pri normalni vakuumski čistilni napravi.

! Glede na posesano vsebino, vrečk ne puščamo v napravi čez noč.

5. Mikro filtru ni potrebno posvečati posebne pozornosti. Potrebno ga je redno menjavati, seveda glede na pogostost uporabe. Papirnata vrečka, vrečka iz blaga in dva filtra iz blaga, ščitita filter.

UPORABNIKU MORA BITI V INTERESU, DA NAPRAVO REDNO VZDRŽUJE IN TAKO PODALJŠA ŽIVLJENSKO DOBO NAPRAVE IN ZAŠČITI SVOJE ZDRAVJE.



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**